




huka
BIKES

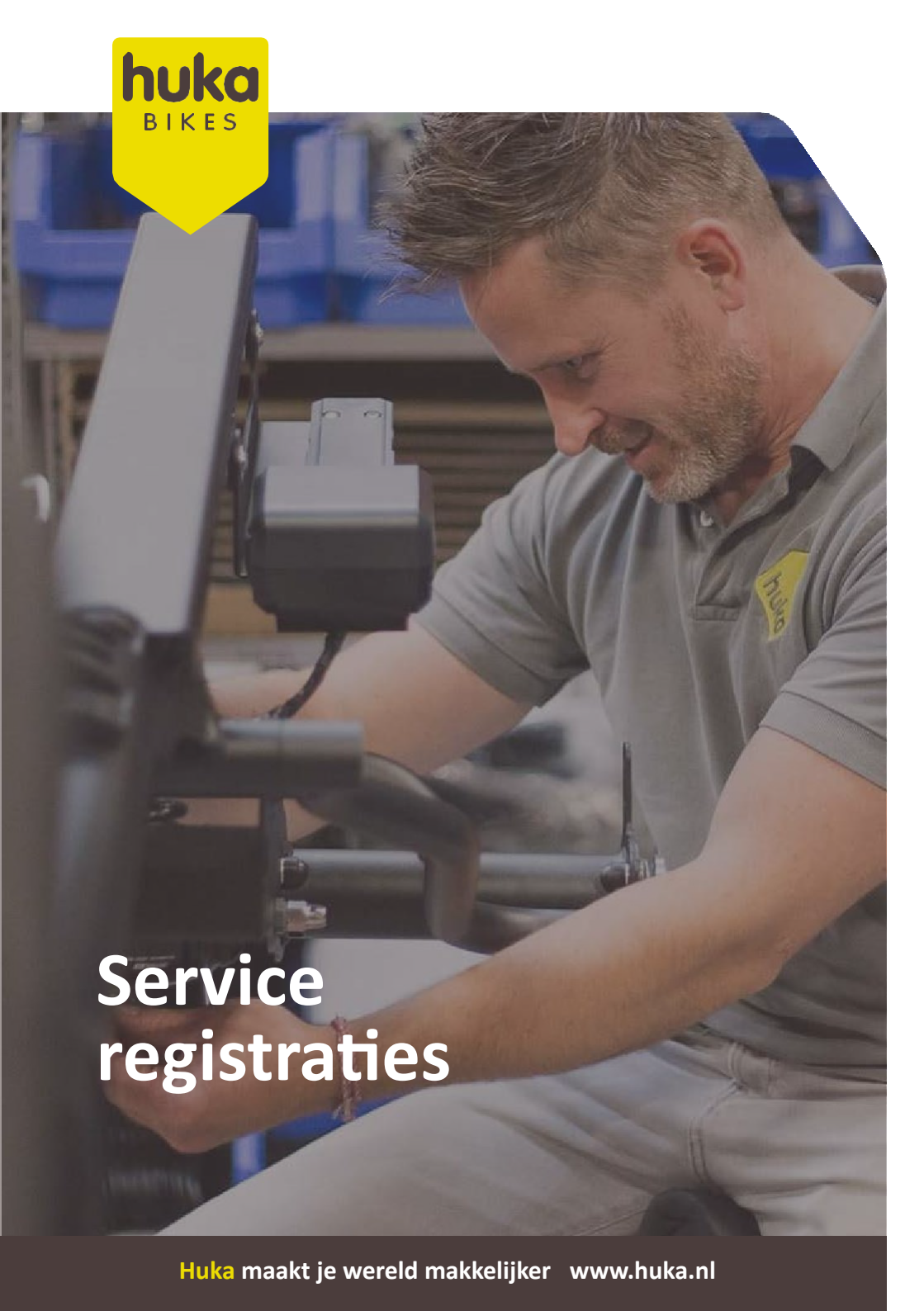

A male technician with short brown hair and a beard, wearing a grey polo shirt with a small yellow Huka logo on the chest, is focused on working on a bicycle. He is using a tool to adjust the handlebars. The background shows a workshop setting with blue storage bins.

Service registraties

Huka maakt je wereld makkelijker www.huka.nl

[illegible]

WWW.HUKA.NL/GARANTIE



Optimaal plezier van jouw Huka

Onbezorgd fietsen en weer de vrijheid, zelfstandigheid en stabiliteit ervaren zoals je gewend was? Met jouw Huka fiets heb je onbegrensde mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat jouw Huka fiets optimaal functioneert is het essentieel om de fiets periodiek te laten onderhouden.

Dit serviceboekje maakt het mogelijk om eenvoudig de registraties hiervan bij te houden. Daarnaast geven we je tips over het onderhoud van jouw Huka fiets. Mocht je jouw Huka fiets in de toekomst willen verkopen dan kan je met dit boekje, als deze consequent is ingevuld, aantonen dat jouw Huka fiets goed onderhouden is.

Heb je vragen over het onderhoud? Neem dan contact op met jouw dealer. Zij adviseren je graag en voeren het periodieke onderhoud graag voor je uit. We wensen je veel fietsplezier!

Hartelijke groet,

Milan Leusink
Service monteur



Inhoud

Jouw aantekeningen	2
Algemeen	5
Gerenommeerde onderdelen.....	5
Garantie	5
Contactgegevens Huka	5
Onderhoud & controles.....	6
Periodieke onderhoudsbeurt.....	6
Controles.....	7
Serviceplanning	8

Algemeen

GERENOMMEERDE ONDERDELEN

Jouw Huka fiets is in Twente gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van gerenommeerde onderdelen en de nieuwste techniek uit de fietsbranche. Zodoende biedt jouw Huka fiets goede servicemogelijkheden. Bij aflevering van jouw Huka fiets zijn de onderdelen goed afgesteld en afgestemd op jouw wensen, zodat je zo lang mogelijk plezier hebt van jouw Huka fiets.

GARANTIE

Alle garanties worden uitgevoerd door jouw Huka dealer. Meer informatie over garantie van jouw Huka fiets tref je in de handleiding die je hebt ontvangen. Of ga naar www.huka.nl/handleiding voor de meest actuele versie.

TIP VAN MILAN Schrijf hieronder het frame- en sleutelnummer op van jouw Huka. Het nummer is van belang bij garanties, reparaties of in het geval jouw fiets is gestolen voor het opgeven aan jouw verzekering. De locatie waar het framenummer bevindt verschilt per fiets en staat beschreven in de handleiding.

Framenummer

Sleutelnummer



Huka BV
Munsterstraat 13, 7575 ED Oldenzaal
The Netherlands, Tel: +31 (0) 541 572472
SRN: NL-MF-000001494

Type/Typ:

Max gewicht/Max weight KG:

2023-07
SN 2307184



Voorbeeld indentificatiesticker

CONTACTGEGEVENS HUKA

Heb je suggesties om onze Huka fietsen te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Munsterstraat 13, 7575 ED te Oldenzaal

0541-572472

info@huka.nl

www.huka.nl

Onderhoud & controles

Optimaal rijcomfort creëer je door de fiets goed te onderhouden. Daarnaast adviseren wij je het jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door jouw Huka dealer. Zij controleren jouw Huka fiets op functionaliteit, veiligheid en mogelijke slijtage.



Na ca. 200 kilometer of na 2 maanden dien je de eerste beurt te laten uitvoeren door jouw Huka dealer. Zij inspecteren de moeren, ketting- en spaakspanning etc. Indien je het onderhoud laat uitvoeren door een niet-Huka dealer, dan kan dit invloed hebben op de garantie.

PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURT

Een periodieke onderhoudsbeurt bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Controle van de spaak- en bandenspanning en de conditie van de banden.
- De ketting spannen, reinigen en smeren.
- Draaiende delen reinigen en smeren waar nodig.
- Alle bouten en moeren natrekken.
- Controle en afstellen van de remmen en de parkeerrem.
- Controle of differentieel goed draait.
- Versnelling en balhoofdlager afstellen.
- Verlichting controleren.
- Trapas en pedalen controleren op speling.
- Controle op lakwerk en frameschade.
- Software controleren op updates.
- Controle of kabels vrij lopen en niet zijn beschadigd.
- Waar nodig onderdelen vervangen.
- Schoonmaakbeurt.
- Proefrit ter controle of alles goed functioneert.

TIP VAN MILAN Is bij jouw Huka de eerste onderhoudsbeurt verricht? Plan vervolgens jaarlijks of na elke 2000 km een onderhoudsbeurt in bij jouw dealer om jouw Huka fiets in optimale conditie te houden.

CONTROLES

TIP VAN MILAN Om jouw Huka fiets in optimale conditie te houden, adviseren we je om ook zelf periodiek jouw Huka fiets te controleren op een aantal punten. Bij voorkeur maandelijks. Hieronder tref je een checklist hiervoor.

Checklist

- De bandenspanning en de conditie van de banden.
- De werking van de remmen.
- De verlichting en reflectoren.
- Zit het zadel stevig vast?
- Zit het stuur goed vast?
- Zijn de wielen spelingsvrij?
- Is de spaakspanning goed van alle wielen?
- Kettingspanning en smering
- Zitten alle bouten en moeren goed vast?
- Is het lakwerk schadevrij?
- Reinig de fiets regelmatig.

Meer informatie over hoe je jouw Huka het beste kan onderhouden wordt beschreven in de handleiding.



Neem bij een defect direct contact op met jouw Huka dealer. Gebruik de fiets niet of zo min mogelijk totdat de storing verholpen is. Jouw veiligheid staat voorop!

Serviceplanning

1e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		

2e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		

3e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		

4e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

5e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

6e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

7e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

8e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

9e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

10e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

11e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

12e onderhoudsbeurt		
Datum		Stempel dealer
Dealer		
Monteur		
Opmerkingen		
..... 		

Is jouw 12^e onderhoudsbeurt voltooid? Vraag dan een nieuw serviceboekje aan bij jouw dealer.

Huka maakt je wereld makkelijker

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de individuele rijders, vinden wij een goede service essentieel! Huka staat bekend om haar goede service en vergaande betrokkenheid. Heb jij een Huka fiets van Huka in bezit en wil je graag het periodieke onderhoud laten verrichten? Onze dealers voeren alle werkzaamheden rondom het onderhoud graag voor je uit!

Jouw Huka-dealer

